

RHEOSEPT® FD plus

Hochkonzentriertes Desinfektionsmittel für Oberflächen und nicht invasive Medizinprodukte



- wirtschaftliches Hochkonzentrat zur manuellen Desinfektion
- leistungsstark bei niedrigen Konzentrationen
- begrenzt viruzid plus
- bei erhöhten Wirksamkeitsanforderungen
- aldehydfrei

CE 0044 N-113309

Anwendungsbereiche/-gebiete

Geeignet für wasserfeste Oberflächen sowie medizinisches Mobiliar, Gegenstände und Geräte. Zur Nutzung in Steckbeckenspülautomaten anwendbar. Nicht geeignet zur Desinfektion von Hautoberflächen.

Anwendungshinweise

Gebrauchslösung aus Wasser und Flächenendesinfektionsmittelkonzentrat gemäß der vorgesehenen Anwendungskonzentrationen unter Berücksichtigung der gewünschten Anwendungsdauer herstellen. Die gebrauchsfertige Lösung auf die vorgereinigte Oberfläche dünn auftragen und dabei auf eine vollständige Benetzung achten. Um Desinfektionsmittelrückstände von Oberflächen zu entfernen, sind diese nach der Einwirkzeit mit Wasser nachzuwischen. Nur frisch angesetzte Lösungen verwenden. Nur durch eingewiesenes und geschultes Personal zu verwenden. Die Vorgaben des Herstellers des zu desinfizierenden Medizinproduktes sind zwingend zu beachten.

Wirkspektrum

Bakterizid, Levurozid, begrenzt viruzid plus (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2, Adeno, Noro).

Alle Eigenschaften des Wirkungsspektrums sind durch Nachweise akkreditierter Laboratorien belegt.

Wirksamkeit	Norm	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid/ levurozid	EN 13727, EN 13624, EN 16615	0,5/1/3 %	60/15/1 Minuten
bakterizid/ levurozid	VAH	0,5/1/3 %	60/15/5 Minuten
begrenzt viruzid	EN 14476	3 %	15 Minuten
begrenzt viruzid	EN 14476	1 %	60 Minuten
begrenzt viruzid plus	EN 14476	5 %	15 Minuten
Noro	EN 14476	2 %	5 Minuten
Noro	RKI/DVV	1 %	60 Minuten

Listungen

Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) und IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz).

Registrierungen

Dual-Use Produkt: Medizinprodukt Klasse IIa (CE 0044), Biozidprodukt (BAuA Reg. Nr. N-113309).

Zusammensetzung

100 g Flüssigkeit enthalten als Wirkstoff: 5,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 1,9 g Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, Chloride, 4,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Weitere Inhaltsstoffe: Komplexbildner, Alkohole, Duftstoffe.

Physikalische und chemische Eigenschaften

pH-Wert: 9 (Anwendung)

pH-Wert: 11,0-11,5 (Konzentrat)

Geruch: parfümiert

Farbe: gelb

Form: flüssig

Hinweise

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten, dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bei 5 - 30 °C, lichtgeschützt und geschlossen lagern.

Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

Zusätzliche Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden

Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70, E-Mail: vertrieb@rheosol.com.

Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikel	Inhalt	VPE	Palette
20502352	RHEOSEPT-FD plus Flasche	1000 ml	10 Stk./Karton	560 Stk.
20502050	RHEOSEPT-FD plus Kanister	5 L	1 Stk.	56 Stk.
20502070	RHEOSEPT-FD plus Kanister*	5 L	1 Stk.	69 Stk.
20502100	RHEOSEPT-FD plus Kanister	10 L	1 Stk.	60 Stk.

* geeignet für Steckbeckenspülautomaten