

RHEOSEPT® WD plus

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für alkoholempfindliche Oberflächen und nicht invasive Medizinprodukte



- alkoholfreie materialschonende Wischdesinfektion
- geeignet für empfindliche Medizinprodukte u. a. Ultraschallköpfe und Acrylglas
- enthält Reinigungskomponente
- anwendungsfertig und wirksam bereits ab 1 Minute Einwirkzeit
- dermatologisch getestet

CE 0044 N-110932

Anwendungsbereiche/-gebiete

Desinfektion im Wischverfahren für wasserfeste Oberflächen sowie medizinisches Mobiliar, Gegenstände und Geräte mit Oberflächen aus Metall, Kunststoff (inklusive Acrylglas), Lack und Keramik. Nicht geeignet zur Desinfektion von Hautoberflächen.

Anwendungshinweise

Produkt unverdünnt auf die zu desinfizierende Oberfläche auftragen und mindestens eine Minute einwirken lassen (siehe Anwendungstabelle). Um eine optimale Desinfektionswirkung zu gewährleisten auf vollständige Benetzung achten. Das Produkt kann auch als Schaum auf ein Tuch geben und die trockene Oberfläche gleichmäßig benetzen. Einwirkzeiten unbedingt einhalten. Bei sichtbaren Verschmutzungen ist die Oberfläche mit RHEOSEPT-WD plus vorzureinigen. Die behandelten Flächen sind in regelmäßigen Abständen mit klarem Wasser zu reinigen. Es wird empfohlen, während der Anwendung Handschuhe zu tragen. Nicht mit anderen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln mischen.

Wirkpektrum

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2). Weitere Wirknachweise: Norovirus, Polyomavirus/SV40 und Rotavirus.

Alle Eigenschaften des Wirkungsspektrums sind durch Nachweise akkreditierter Laboratorien belegt.

Wirksamkeit	Norm	Einwirkzeit
bakterizid/levurozid	EN 13727, EN 13624, EN 16615, VAH	1 Minute
begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sekunden
Polyomavirus/SV40	EN 14476	30 Sekunden
Rotavirus	EN 14476	1 Minute
Norovirus	EN 14476	30 Minuten

Listungen

Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) und IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz).

Registrierungen

Dual-Use Produkt: Medizinprodukt Klasse IIa (CE 0044), Biozidprodukt (BAuA Reg.-Nr.: N-110932)

Zusammensetzung

100 g Flüssigkeit enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumc

RHEOSEPT® WD plus

hlorid, 0,25 g Benzalkoniumchlorid, 0,25 g Alkyldimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid.

Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe (Linalyl Acetate).

Physikalische und chemische Eigenschaften

pH-Wert: 6

Farbe: hellgelb

Geruch: parfümiert

Hinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur für professionelle Anwender (für den gewerblichen Einsatz durch geschultes und eingewiesenes Personal).

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten, dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bei 5 - 30 °C, lichtgeschützt und geschlossen lagern.

Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten.

Sorgfältig wiederverschlossene Gebinde sind bis zu 12 Monate verwendbar, sofern das Verwendbarkeitsdatum nicht überschritten wird.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

Zusätzliche Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70, E-Mail: vertrieb@rheosol.com.

Haltbarkeit nach Anbruch

Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikel	Inhalt	VPE	Palette
20512345	RHEOSEPT-WD plus Schaumsprühflasche	500 ml	20 Stk./Karton	720 Stk.
20512370	RHEOSEPT-WD plus Schaumsprühflasche	750 ml	6 Stk./Karton	600 Stk.
20512352	RHEOSEPT-WD plus Flasche	1000 ml	10 Stk./Karton	560 Stk.
20512050	RHEOSEPT-WD plus Kanister	5 L	1 Stk.	56 Stk.
20512100	RHEOSEPT-WD plus Kanister	10 L	1 Stk.	60 Stk.